



### Enthält/contains/contient/contiene:

Potassium Caraoate, Sodium Bicarbonate, Citric Acid, Sodium Carbonate, Sorbitol, VP/VA Copolymer, Sodium Lauryl Sulfate, Sodium Lauryl Sulfoacetate, Aroma, CI 73015.

### Reinigungstablette für Zahnschienen

#### Cleansing tablet for dental splints

Comprimé à nettoyage pour gouttières dentaires

Comprimido para la limpieza de férulas dentales

Compresa per la pulizia dei bite

Tabletki do profesjonalnego czyszczenia szyn

Bestell-Nr./Order number/Réf.: **280 032**  
32 Tabs



### Oxydens Clean-set

Bestell-Nr./Order number/Réf.: **280 030**  
1 Oxydens Clean-set (box + cup) • 32 Tabs



### Oxydens Clean-box

Bestell-Nr./Order number/Réf.: **280 031**  
5 Oxydens Clean-boxes



### Oxydens Clean-cup

Bestell-Nr./Order number/Réf.: **280 033**  
5 Oxydens Clean-cups



### Reinigungstablette für Zahnschienen

Knirscherschienen, Retainer, Playsafe Sportmundschutz, Silensor-sl Schnarchschutz, kieferorthopädische Apparaturen, Korrekturschienen, Prothesen usw.

Gesundheitsschädlich beim Verschlucken!

Von Kindern fernhalten!



Augenkontakt vermeiden!

### Gebrauchsinformationen:

1. Den Oxydens Clean-cup mit warmem Wasser bis an die Oberkante des Sichtfensters füllen.
- 2./3. Eine Oxydens Tablette und die zu reinigende Zahnschiene in die Oxydens Clean-box legen.
- 4./5. Die geschlossene Clean-box für ca. 15 Min. in den Clean-cup stellen.
6. Die Schiene durch die Clean-box von beiden Seiten gründlich durchspülen, Wasser ausschütten und die Schiene in der Clean-box aufbewahren.
7. Vor dem Gebrauch die Schiene immer nochmal mit Wasser abspülen.

### Ohne Oxydens Clean-set:

1. Eine Oxydens Tablette in ein Glas mit warmem Wasser geben.
2. Die Zahnschiene in das Glas einlegen.
3. Die Zahnschiene für ca. 15 Min. im Glas lassen.
4. Die Schiene jetzt und vor dem Gebrauch gründlich mit Wasser abspülen.

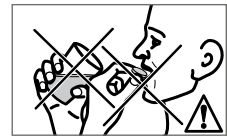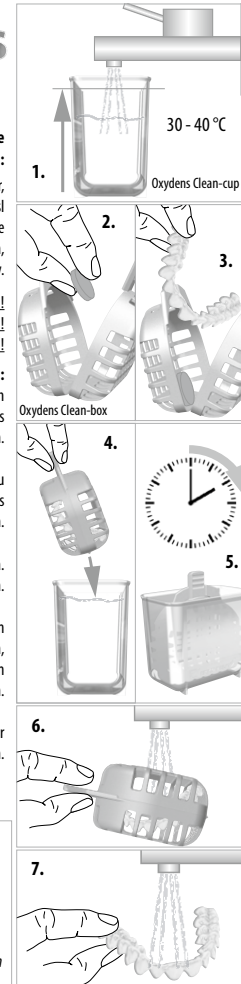

### Cleansing tablet for dental splints

nightguards, retainer, Playsafe sports-mouthguard, Silensor-sl anti-snoring device, orthodontic devices, corrective splints, dentures and more

Harmful if swallowed!

Keep away from children!

Avoid contact with eyes!

### Direction for use:

1. Fill the Oxydens Clean-cup with warm water up to the upper end of the clear window.
- 2./3. Place one Oxydens tablet and the splint to be cleaned into the Oxydens Clean-box.
- 4./5. Put the closed Clean-box into the Clean-cup for approx. 15 min.
6. Rinse well the splint through the Clean-box from both sides. Shake out water and store the splint in the Clean-box.
7. Rinse the splint one more time with water before use.

### Without Oxydens Clean-set:

1. Drop one Oxydens tablet into a glass with warm water.
2. Put the splint into the glass.
3. Leave the splint for approx. 15 min. in the glass.
4. Rinse well the splint now and before use with water.

